



HE430915

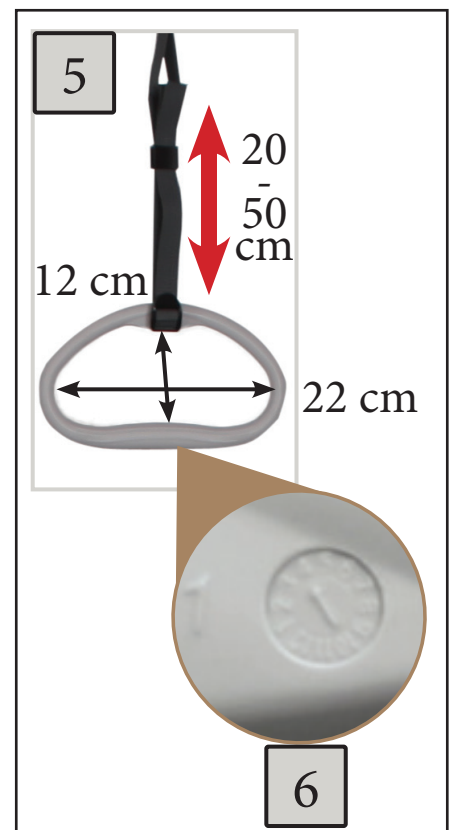

11 kg

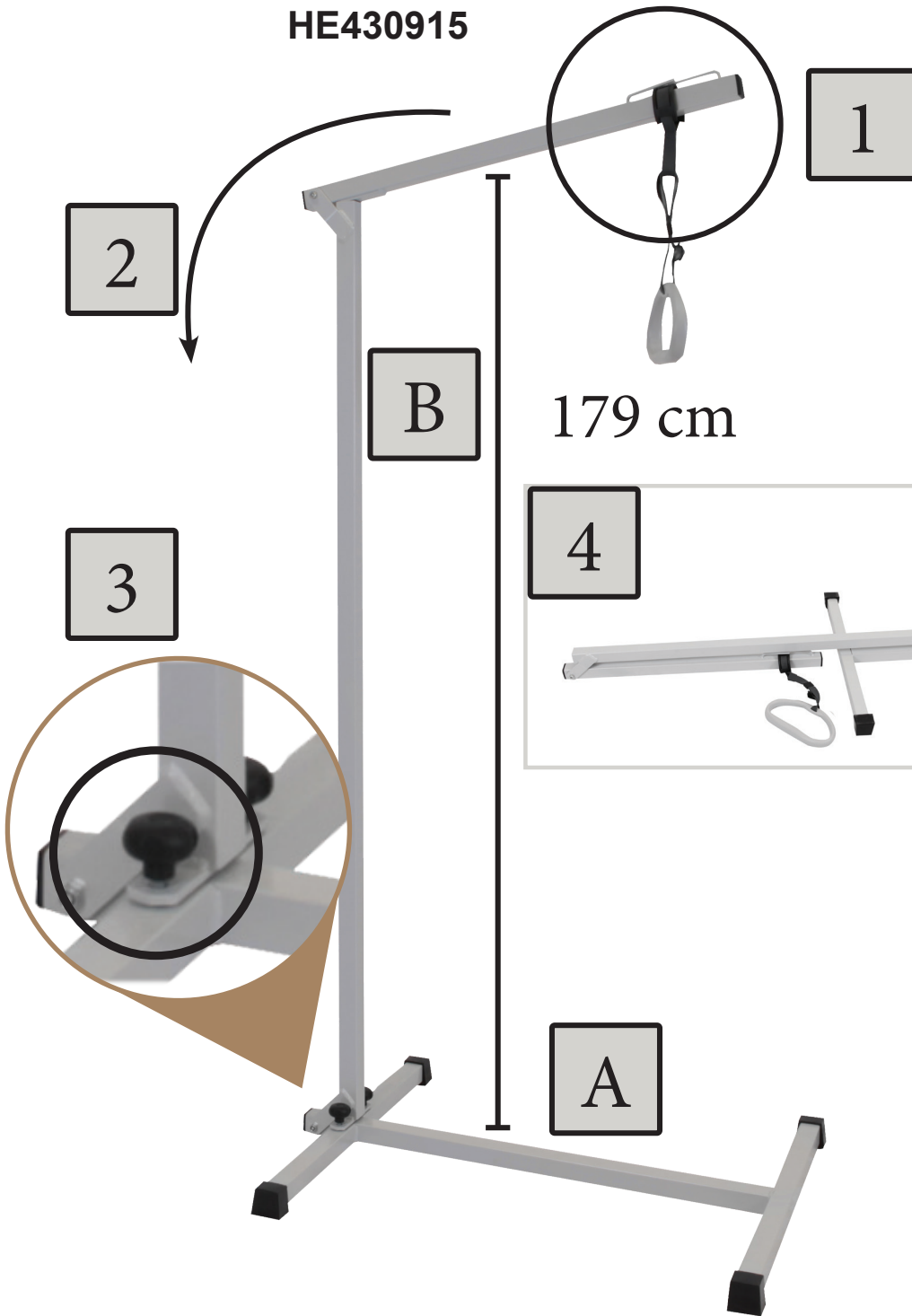

130 kg



1

2

3

4

| SV |
|--------------------------------------|
| Förklaring av symboler |
| Medical Device |
| Läs bruksanvisningen före användning |
| Följ säkerhetsanvisningarna! |
| CE-överensstämmelse |

6

Läs dessa anmärkningar noggrant före användning. Se till att följa instruktionerna och förvara dem på ett säkert ställe! Om detta hjälpmedel ska användas av andra personer måste de vara fullständigt informerade om dessa säkerhetsvarningar före användning.

1. Säkerhetsanvisningar

- Rådgör ALLTID med din läkare eller leverantör för att fastställa korrekt justering och användning av enheten.
- Förvara inte utomhus och låt inte vara i solen (Varning: släpp inte in produkten i en bil vid hög utomhustemperatur!!).
- Använd inte i extrema temperaturer (över 38°C)
- Kontrollera noggrant alla delar av denna artikel (skruvar, rör, länkhjul...).
- Kontrollera regelbundet om alla delar är åtdragna.
- Använd endast på rätt sätt
- Häng inget på lyftstången
- Observera ALLTID viktgränsen på märkningen av din produkt.
- Efter montering av bordet, se till att det är säkert låst i ÖPPET läge och i nivå med marken innan användning.
- Inga ändringar får göras på den här enheten. Använd endast originaldelar för att ersätta den trasiga eller defekta delen och låt detta göras av teknisk personal.
- Om du inte har använt ditt bord på länge, låt det kontrolleras av teknisk personal innan du använder det.
- Varje allvarlig incident som har inträffat i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

2. Avsedd användning:

Lyftstången är endast avsedd att användas inomhus. Den kan användas med de flesta vanliga sängar och säten för att ändra position. Placera aldrig lyftstången bredvid sängen eller stolen, utan alltid bakom ryggstödet. Ytterligare fästen på väggen eller vid sängen är inte nödvändiga. Indikationer:

Handikapp eller tillfällig immobilisering av patientens höftgördel, där överkroppens muskelsystem (axelgördel och övre extremiteter) fortfarande gör det möjligt att nå en sittande ställning och höja den nedre delen av kroppen (för att använda ett underlägg för att exempel).

Kontraindikationer:

Lyftstänger kanske inte är lämpliga för människor under vissa omständigheter, till exempel om de har dålig bålkontroll eller smärtsamma axlar, till exempel:

- Allvarliga hjärtproblem • Allvarliga bröstbesvär • Dysfunktion av övre extremiteter i gördeln t.ex. Reumatoid artrit, muskeldystrofi • Svår hemiplegi.
- Där det finns någon möjlighet till axelluxation eller ryggradsbelastning.
- Där det finns risk för tryckområden från potentiell drageffekt.
- Där det finns några tecken på ett förvirrat tillstånd.

3. Beskrivning och monteringsanvisningar

Endast specialister kan anpassa produkten och lära dig hur du använder den. Felaktig användning eller justering kan leda till överbelastning av enheten eller patienten. Fråga den tekniska personalen hur man använder denna produkt och se till att du tydligt förstod deras förklaring. Försiktighet bör iaktas så att basen på lyftstången är korrekt placerad under sängen, annars kan ramen välta. Se dessutom till att det finns tillräckligt med utrymme mellan sängen/stolen och golvet för att lyftstången ska kunna skjutas under den. Produktbeskrivning: Lyftstången är gjord av en stålram och en triangel. Både höjden och handtagets position är justerbar. Lyftstången kan snabbt tas isär, vilket gör den enkel att transportera och förvara. Denna lyftstång stödjer upp till 90 kg vid trapetsstyret, vilket innebär att den maximala användarens vikt är 130 kg. Om produkten inte används under en längre tid måste den förvaras på en torr plats och skyddas mot damm och direkt solljus. Monteringsanvisningar:

1. Placera basen på marken.
2. Fäst stolpen [B] på basen [A] med de räfflade skruvarna [3].
3. Fäll ut den övre delen av lyftstången framåt [2].
4. Placera lyftstången korrekt vid sängändan, fäst trapetshandtaget på lyftstången [1] och justera höjden på trapetshandtaget med hjälp av remmen (från 55 cm till 70 cm) [5].
5. För att vika stången, fortsätt i omvänd ordning.

4. Städning

Stången ska regelbundet rengöras med en torr och ren trasa.

Trapetshandtaget har en datumklocka (7). Vid normal användning håller trapetshandtaget i fem år. Byt handtaget efter 5 år.

5. Material

Rör i kromat eller epoxilackerat stål, polyamidband och PP-handtag.

6. Avfallshantering

Kassera denna produkt i enlighet med dina regionala regler för avfallshantering.

7. Tekniska specifikationer

Kontrollera tabellen i slutet av bruksanvisningen.

Denna produkt har 24 månaders garanti, från inköpsdatum, mot eventuella tillverkningsfel. Användningstid: 2 år..