

Handtag för badkar

Vänligen inspektera alla delar noggrant för sprickor/brott före användning.

Användningsinstruktioner:

Denna produkt ska användas som hjälpmedel för bättre balans och stöd när man kliver i och ur badkaret. Denna produkt är **INTE** designad för att stödja användarens totala vikt. När du kliver i eller ut ur badkaret, håll i badkarshandtaget lätt och applicera nedåtriktad kraft på överdelen av handtaget.

Handtagets delar:

- A. Fäste för in -och utsida
- B. Handtag
- C. Åtdragningsvred
- D. Badkar

Dra eller tryck INTE på badkarshandtaget i sidled, detta kommer att lossa badkarshandtaget från badkaret och kan orsaka skada. **ANVÄND INTE** badkaret med badkar med läppar. Dra **INTE** åt horisontella bultar för hårt. Detta kan orsaka skador på badkaret och/eller badkaret. Max användarvikt 100 kg

Montering:

1. Fästet (A) ska sitta på insidan av badkaret och vredet (C) på utsidan av badkaret.
 2. Rengör noggrant området av badkaret där badkaret ska fästas.
 3. Skruva loss spännvredet (C) så att tillräckligt med utrymme skapas för att montera fästet på utsidan av badkaret.
 4. Sänk ned badkarsstången på området för badkaret (D) så att åtdragningsknappen (C) är utanför badkaret.
- Dra åt vredet (C) så att badkarsstången är ordentligt fastsatt i badkaret.

Underhåll:

Rengör med mildt rengöringsmedel och vatten eller antibakteriellt rengöringsmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel eller trasor. Torka noggrant efter varje användning. Kontrollera regelbundet för täthet. Applicera regelbundet ett silikonsmjörjmedel på skruvgången på åtdragningsvredet för att förhindra rost.

